



NOTICE DE MONTAGE



Manipulateur utérin 2f Surgical

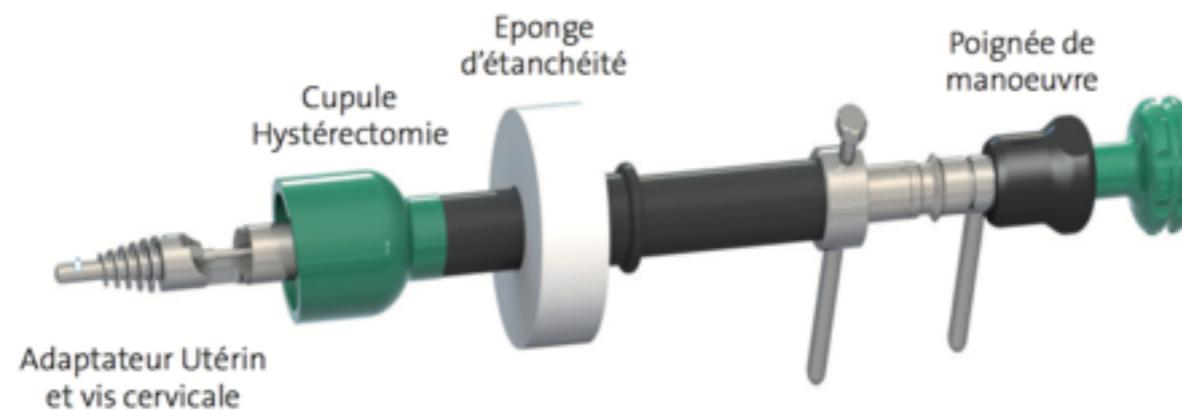

Récapitulatif des pièces à assembler.

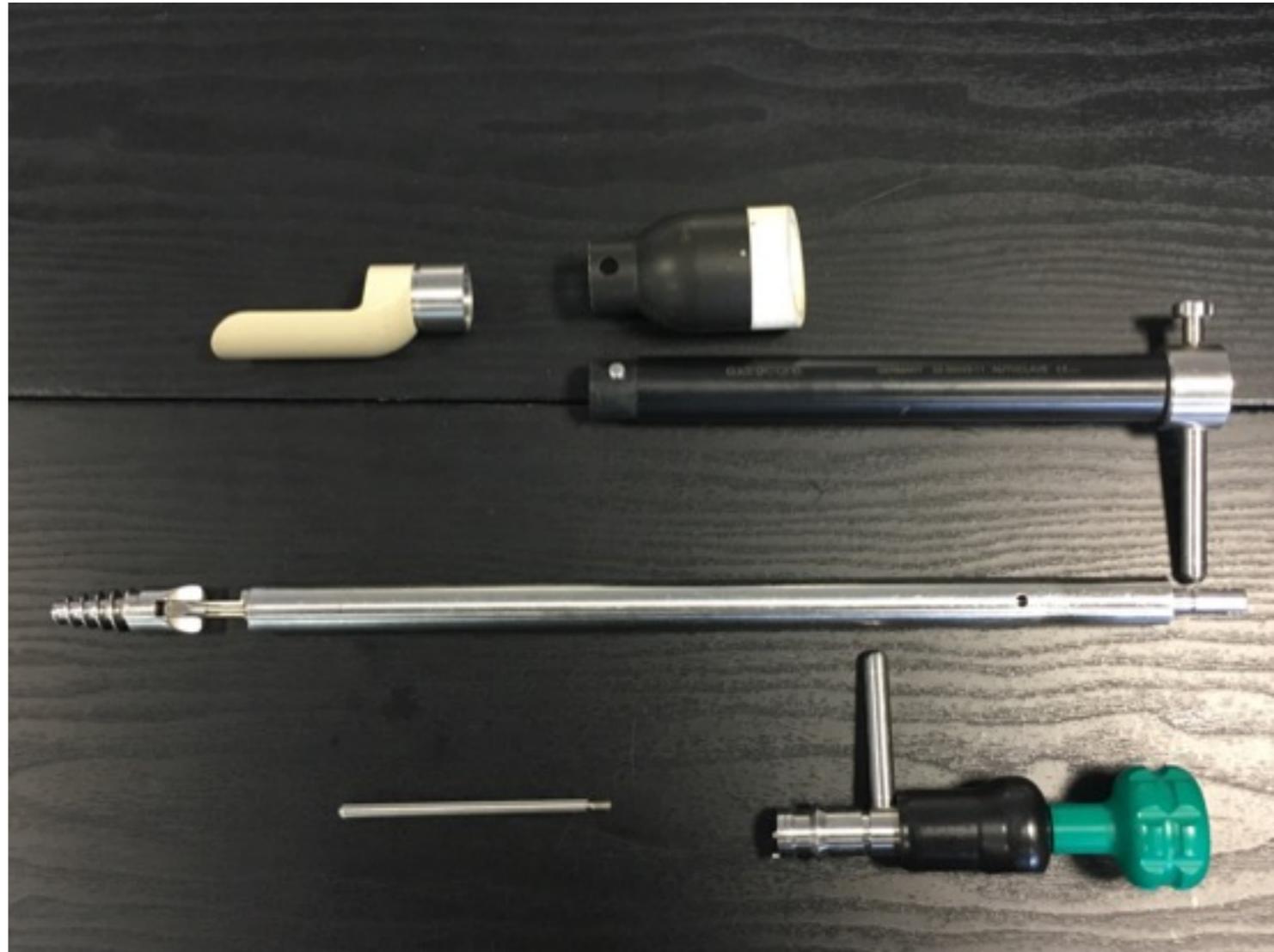

Etape n°1

Montage de la poignée de manoeuvre sur l'axe principal.




Etape n°2

Montage de la chemise.



Etape n° 3

Serrage de la vis de blocage.

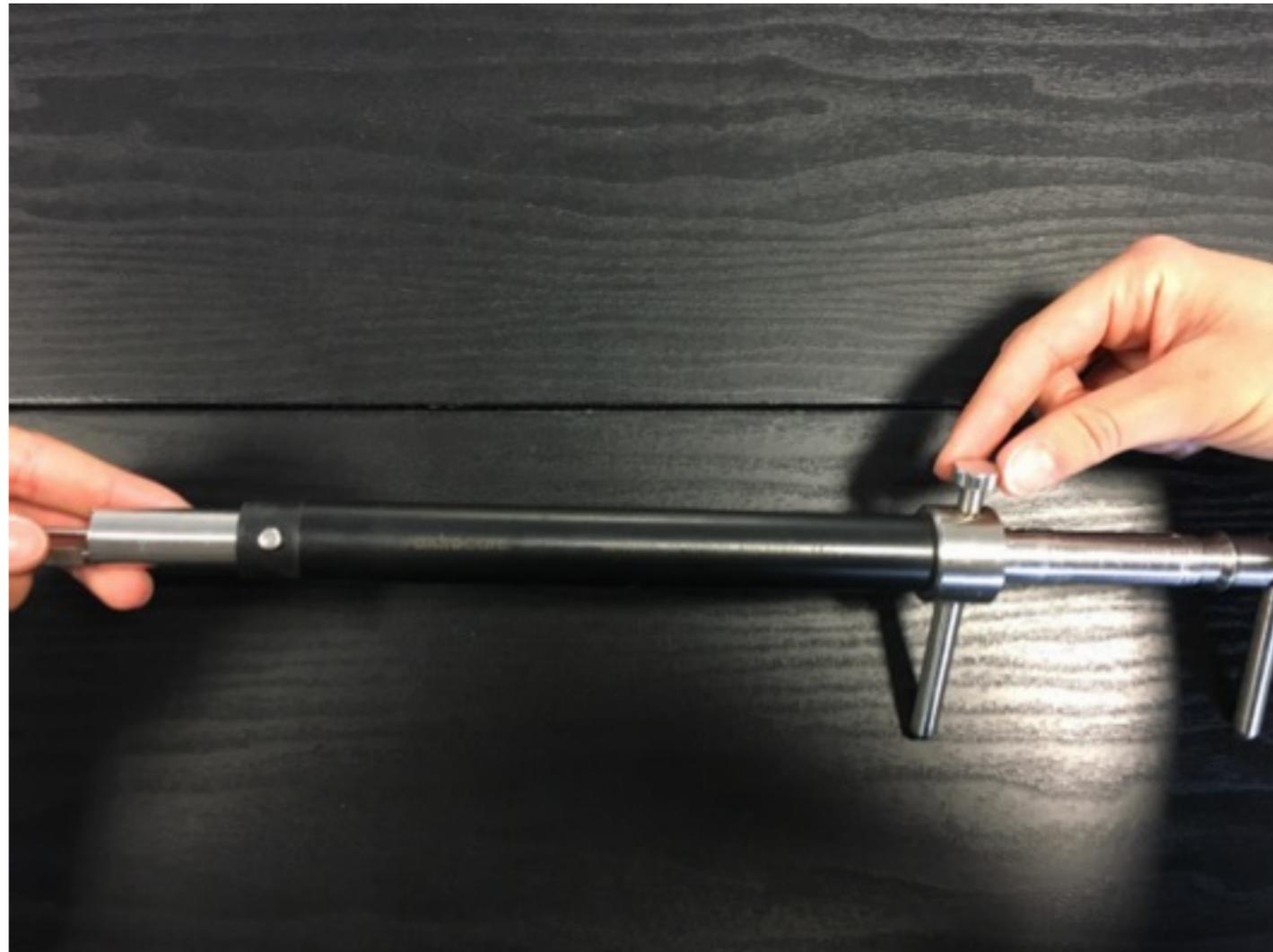

Option 1 : Montage de la cupule pour hystérectomie



Option 2 : Montage de la valve PEEK pour promontofixation



Etape n°4 :

Montage de l'hystéromètre
(Choisir une longueur de 20 mm inférieure à l'hystérométrie).



Vue finale

1. Version hystérectomie



2. Version promontofixation



Manipulation de la poignée de manoeuvre :

Antéversion ou rétroversion en tournant la poignée de manoeuvre.

Nota : La poignée ne tourne que sur 180° à droite ou à gauche selon antéversion ou rétroversion. Ne pas forcer au-delà.

