



Traitement minimal invasif pour l'incontinence urinaire d'effort chez la femme

DEXSUI® est un agent de comblement composé de Dextranomère et d'Acide Hyaluronique destiné à être injecté dans l'urètre sans cystoscopie à l'aide d'un applicateur dédié.

Solution innovante, rapide, sûre et efficace réalisée en ambulatoire, Dexasui® est une alternative dans le traitement de l'IUE féminine n'affectant pas une chirurgie à un stade ultérieur.

Composition :



- 1 seringue de 1mL
- 50 mg Dextranomère
- 17 mg Acide Hyaluronique réticulé
- 9 mg NaCl
- Eau distillée

Avantages :

- Injection sans cystoscopie à l'aide d'un applicateur breveté
- Procédure peu invasive
- Effets secondaires minimes
- Retour à une activité normale dans les 24 à 48 heures
- N'affecte pas une chirurgie majeure à un stade ultérieur
- Les études démontrent un taux de réussite d'environ 75 % avec les agents de comblement

Référence	Désignation	IUD
KIT DEXSUI 2F	2 seringues 1 mL DEXSUI 2 aiguilles stériles 20G 1 applicateur 1 gel anesthésiant lubrifiant	3770020323454

Procédure :

- 1- Mesure de la longueur de l'urètre à l'aide d'une sonde type Foley
- 2- Marquage de la longueur de l'urètre sur la sonde au ras de l'urètre
- 3- Reproduction sur l'applicateur



Avancer l'applicateur dans l'urètre jusqu'à la marque mesurée.

Les injections de 0,5 mL de DEXSUI se font en position urétrale moyenne. 3-6-9-12H

Protocole d'injection :

L'injection se fait biseau vers le haut


1- Injecter 0,5 mL guide à 3H

2- Tourner l'applicateur à 9H
Injecter 0,5 mL

Changer de seringue

3- Tourner l'applicateur à 12H
Injecter 0,5 mL

4- Tourner l'applicateur à 6H
Injecter 0,5 mL

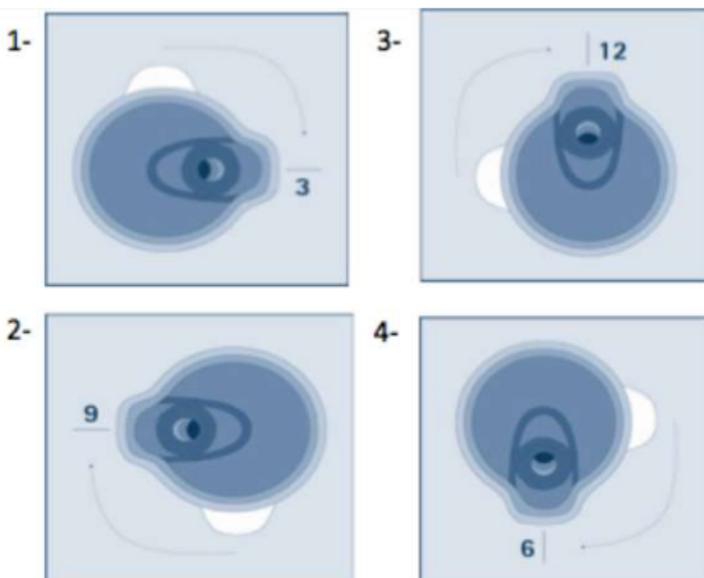

2292 fabriqué par EKSP0