



www.2fsurgical.com

Implants de réfection de paroi Gamme 2f Mesh[®]




Gamme 2f MESH®

IMPLANT 2f BUMP-MESH



Face Péritonéale

Les implants **2f Bump-Mesh** sont fabriqués à base de monofilaments de polypropylène (PP) 90g/m2. Préformés, prédécoupés ils sont munis de repères thermomarkés permettant une orientation aisée de la prothèse dans l'espace.

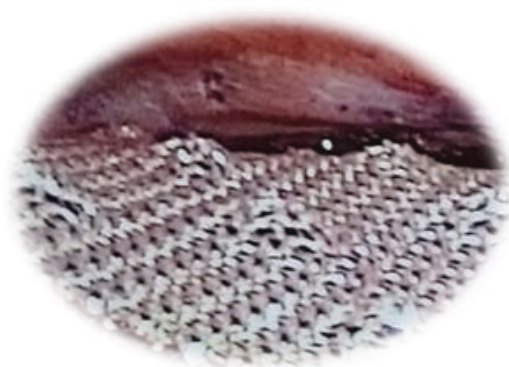

Face Pariétale

La face pariétale de l'implant est munie de petits bourrelets qui ont été réalisés dans la matière par un procédé de fabrication breveté. Les bourrelets renforcent la fixation primaire de l'implant.



IMPLANT BUMP-MESH



Développé pour être utilisé dans la cure de hernie inguinale sous laparoscopie, **2f Bump-Mesh** délivre un ancrage sur sa face pariétale.

Pouvant être introduit aisément dans un trocart, l'implant présente une excellente mémoire de forme facilitant sa mise en place.

La prothèse est déclinée en différentes tailles et formes adaptées à la région anatomique.

Son utilisation permet de diminuer le coût de la procédure de l'approche laparoscopique en combinant toutes les fonctionnalités du renforcement prothétique et de la fixation.

Référence	Désignation	Pictogramme	IUD	Conditionnement
DS601150	2F Bump-Mesh 12x15 cm Droite		3700458403176	1 implant par boîte
DS601151	2F Bump-Mesh 12x15 cm Gauche		3700458403183	1 implant par boîte
DS601160	2F Bump-Mesh Anatomique 10x16 cm Droite		3700458402957	1 implant par boîte
DS601161	2F Bump-Mesh Anatomique 10x16 cm Gauche		3700458402964	1 implant par boîte
DS601019	2F Bump-Mesh auto- adhérent Lichtenstein droite avec rabat 08 x 11 cm		3700458404111	1 implant par boîte
DS601119	2F Bump-Mesh auto- adhérent Lichtenstein gauche avec rabat 08x11 cm		3700458404128	1 implant par boîte
DS601018	2F Bump-Mesh auto- adhérent Lichtenstein 08x11 cm		3700458404326	1 implant par boîte

IMPLANT ANATOMIQUE JG



L'implant anatomique JG est fabriqué à partir d'un treillis indémaillable tricoté avec un monofilament de 150µm, 100% polypropylène biocompatible.

Il est disponible en maille standard de densité 90g/m² ou en maille légère 60g/m².

Il est conçu spécialement pour recouvrir parfaitement toutes les zones de faiblesse des régions inguinales.

Il s'utilise dans les cures de hernie de l'aîne aussi bien en coelioscopie qu'en laparotomie.

L'implant JG doit être placé dans l'espace prépéritonéal. Sa bonne mémoire de forme et sa grande souplesse facilitent son déploiement dans l'espace prépéritonéal.



Sa mise en place et son orientation sont facilitées par le repère sur son bord inféro-interne ainsi que par la zone de thermo soudure qui vient se placer sur les éléments du cordon et donne une bonne vision de la position de l'implant sous coelioscopie.

Référence	Désignation	IUD	Conditionnement
DS411040	Implant anatomique 10 x 14 cm Droit maille standard	3700458403800	1 implant par boîte
DS411041	Implant anatomique 10 x 14 cm Droit maille standard	3700458403817	1 implant par boîte
DS411060	Implant anatomique 12 x 16 cm Droit maille standard	3700458403848	1 implant par boîte
DS411061	Implant anatomique 12 x 16 cm Gauche maille standard	3700458403855	1 implant par boîte
DS412040	Implant anatomique 10 x 14 cm Droit maille légère	3700458403862	1 implant par boîte
DS412041	Implant anatomique 10 x 14 cm Gauche maille légère	3700458403879	1 implant par boîte
DS412060	Implant anatomique 12 x 16 cm Droit maille légère	3700458403909	1 implant par boîte
DS412061	Implant anatomique 12 x 16 cm Gauche maille légère	3700458403916	1 implant par boîte

IMPLANT ANATOMIQUE 3D



**Maille légère
(x1,5)**

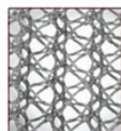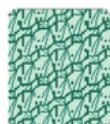

**Maille standard
(x1,5)**

L'implant anatomique 3D est fabriqué à partir d'un treillis indémaillable tricoté avec un monofilament 100% polypropylène biocompatible 90g/m² et 60g/m².

Il est conçu spécialement pour recouvrir parfaitement toutes les zones de faiblesse des régions inguinales. Il s'utilise dans les cures de hernie de l'aîne par voie coelioscopique.

L'implant 3D doit être placé dans l'espace préperitonéal. Sa bonne mémoire de forme et sa grande souplesse facilitent son déploiement dans l'espace préperitonéal.

Sa mise en place et son orientation sont facilitées par un repère sur son bord inféro-interne ainsi qu'une échancrure placée sur les éléments du cordon.

L'implant est réversible droite gauche.

Référence	Désignation	Pictogramme	IUD	Conditionnement
DS413160	Implant anatomique 15 x 10 cm maille standard		3700458404371	1 implant par boîte
DS414160	Implant anatomique 15 x 10 cm maille légère		3700458404388	1 implant par boîte
DS414215	2F MESH 12 x 15 cm maille légère		3700458404357	1 implant par boîte



Implantée dans le sud de la France, née de la rencontre entre la connaissance du monde chirurgical et la haute technologie, 2f Surgical propose des solutions innovantes en chirurgie.



Partenaire de votre technicité chirurgicale



Résolument
tournée vers
l'avenir

2f Surgical
fait la promotion
de techniques
chirurgicales
modernes
prenant en
compte les
contraintes
médico
économiques des
établissements
de soins.

Le Grand Bosquet B
Chemin de Font Sereine
13420 GEMENOS
FRANCE

Tél. : +33 4 42 82 95 54
Mail : contact@2fsurgical.com

